

SENSOR DE CO2



- No sumergir el sensor.
- Lavar con soluciones de alcohol isopropílico al 70%, lavandina al 10%, limpiador desinfectante como Steris Coverage Spray HB, amoníaco o con agua y jabón suave.
- Enjuagar con un paño suave y limpio humedecido con agua.
- Asegurarse de que las ventanas del sensor estén limpias y secas antes de cada uso.

Esterilización

Precaución

- El sensor no se debe esterilizar por ningún medio

Nota

- La información que se provee para la limpieza y desinfección se ofrece a modo de guía. Esta puede adaptarse a los protocolos propios de cada servicio, respetando las aclaraciones declaradas previamente.
- La utilización de productos y procedimientos que no concuerden con las indicaciones mencionadas en este documento, repercutirá en un acelerado deterioro del accesorio, pudiendo ocasionar el mal funcionamiento y/o el daño del mismo.

ADAPTADOR DE CO2



Limpiar mediante lavado en una solución jabonosa tibia.

Acto seguido, lavar por inmersión en un líquido desinfectante como ser:

- Alcohol isopropílico al 70%,
- Solución acuosa al 10% de hipoclorito sódico,
- Solución de glutaraldehído al 2,4%, tal como Cidex Plus,
- Amoníaco.

A continuación, se debe enjuagar con abundante agua estéril y dejar secar.

Esterilización

- Autoclave de vapor - solamente adaptadores para adultos.
- Óxido de etileno (ETO) - 1.5 horas de exposición.
- Remojo en solución de Cidex Plus durante 10 horas.
- Remojo en solución Perasafe durante 10 horas



Advertencia

Antes de volver a utilizar el adaptador, asegúrese de que las ventanas están secas y libres de residuos y que el adaptador no ha sido dañado durante su manipulación o la limpieza/proceso de desinfección.